

## Gebruiksaanwijzing elektrische massagetafels Basic

- **Let op** het wielsysteem om de tafel te verplaatsen uitsluitend onbelast gebruiken dus **niet** met iemand erop
- U kunt de glijstangen van het verstelbare ruggedeelte een klein beetje invetten met vaseline zodat deze soepeler glijden.
- Ga niet op het ruggedeelte van de tafel zitten indien deze (iets) omhoog staat, beter is om altijd plaats te nemen op het lange gedeelte !
- Gebruik nooit agressieve middelen om uw tafel schoon te maken beter is een lauw sopje te nemen
- **Let op:** gebruik van (vnl. etherische) oliën kunnen het skaleider aantasten, bescherm het skaleider van de tafel daarom altijd met een speciale PU hoes (plastic hoes) bij gebruik met oliën.
- Bij het zelf verplaatsen van de tafel dient u deze te dragen aan het ijzeren frame dus niet aan het bed zelf.
- Ga niet op de zijanten van het zitvlak van de tafel zitten, neem altijd plaats in lengterichting van de tafel en in het midden van het zitvlak.
- Spuit zonodig af en toe een klein beetje siliconenspray op de scharnier en/of draaipunten v.d. tafel

### Onderhoud:

- \* Reinig de bekleding van uw massagetafel regelmatig om vroegtijdige slijtage te voorkomen (houdt er rekening mee dat ook menselijk zweet de skaleider kan aantasten).
  - \* Een natte doek is voldoende voor het verwijderen van stof. Is de bekleding nog niet helemaal schoon, gebruik dan een zachte spons met zeepwater. Droog de tafel daarna direct af en zorg ervoor dat het water niet door de naden van de bekleding lekt.
  - \* Zeepwater is ook inzetbaar voor het verwijderen van vlekken. Gebruik in ieder geval geen oplosmiddelen of speciale vlekkenverwijderaars, omdat de bekleding polyurethaan (PU) bevat. Alcohol of andere oplosmiddelen lossen het PU op en beschadigen zodoende de bekleding. Test ieder schoonmaakmiddel eerst op een onopvallende plek op de massagetafel.
  - \* De bekleding van de tafels is niet geschikt voor het direct hierop toepassen van massageoliën. Gebruik in dat geval altijd een badstof hoes of badlaken om de bekleding te beschermen. Voor massages met overdadig veel olie, zoals Ayurveda-massages, dient u een speciale PU-hoes te gebruiken. Dit kunnen wij op bestelling leveren.
  - \* Het onderstel van uw massagetafel kunt u schoonmaken met een natte doek of een sopje. Let er dan wel op dat de elektrische delen niet nat worden.